

Funda de Tubo

STANDARD AND SLIMLINE

RESMED

User Instructions

Español

El forro para tubos está concebido para reducir la condensación y la pérdida de temperatura en los tubos de aire ResMed al conectarlos a un dispositivo.

El forro para tubos está disponible en dos variantes, Standard (33963) y SlimLine (36811), a los que en conjunto se denomina 'forro para tubos' en este manual.

Variante	Color	Longitud	Diámetro
33963	Azul	2 m	19 mm
36811	Gris	1,8 m	15 mm

Colocación

1. Abra del todo la cremallera del forro para tubos y despegue la correa de Velcro™.
2. Extienda el forro y póngalo con la parte de dentro hacia arriba.
3. Pase un extremo del tubo de aire a través del extremo cerrado de la cremallera del forro hasta que asome el mango de goma.
4. Sostenga el mango de goma en su sitio y cierre la cremallera del forro para tubos.
5. Doble el extremo sobrante de la cremallera contra el forro y sujételo con la correa de Velcro. Lo único que se debe poder ver son los mangos de goma.

Nota: Si tiene un forro para tubos Standard y quiere utilizarlo con el tubo de aire SlimLine, tiene que dar el siguiente paso adicional entre los pasos 3 y 4:

- En el extremo abierto del forro para tubos, doble lo que sobre, aproximadamente 15 cm, y sujételo con el Velcro.

ADVERTENCIA

No utilice el forro para tubos si la temperatura ambiente es superior a los 30 °C. A temperaturas más altas, la temperatura ambiente en la mascarilla puede que sea demasiado alta.

Nota: En caso de que se produzcan incidentes graves relacionados con este dispositivo, debe comunicárselo a ResMed y a la autoridad competente de su país.

Nota: si ve cambios inesperados en el dispositivo, observa signos de desgaste que afecten al rendimiento del equipo o detecta que la carcasa está rota, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con su proveedor de servicios sanitarios.

Instrucciones de limpieza

El forro sólo se debe lavar a mano o limpiar en seco. Cuando el forro sea nuevo, lávelo por separado puesto que es posible que destiña. No utilice lejía.

Para lavar el forro para tubos:

1. Lávelo en agua fría o tibia con un detergente suave.
2. Aclárelo bien y déjelo escurrir.

Nota: Lavar a mano el forro para tubos no le exime de la necesidad de limpiar los tubos de aire.

Eliminación

El forro para tubos y el envase no contienen sustancias peligrosas, y pueden desecharse junto con sus residuos domésticos normales.

Especificaciones técnicas

Temperatura de almacenamiento y de transporte: entre -20 °C y 60 °C

Humedad de almacenamiento y transporte: entre el 5 % y el 95 % sin condensación

Símbolos

Los siguientes símbolos pueden aparecer en el forro para tubos o en el embalaje.

 Advertencia;  Consulte las instrucciones de uso;  Fabricante;  Representante

autorizado en la UE;  Número de catálogo;

 Código de lote;  Importador;

 Dispositivo médico;  Limitación de

temperatura. Consulte el glosario de símbolos en

www.resmed.com/symbols